

DESCOCEPT® AF WIPES

alkoholische Tücher
zur Schnelldesinfektion

- ✓ dermatologisch getestet
- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei

- aldehydfreie Schnelldesinfektionstücher mit frischem Duft
- umfassende Virenwirksamkeit inkl. Noro-Viren
- gute Hautverträglichkeit



CE 0482



PRÄPARATETYP

DESCOCEPT® AF WIPES sind gebrauchsfertige, aldehydfreie Desinfektionstücher auf der Basis von Ethanol und QAV.

DESCOCEPT® AF WIPES haben einen angenehmen, frischen Duft und eine gute Hautverträglichkeit. Auf Grund der aldehydfreien Formulierung sind Verfärbungen nach Anwendung von **DESCOCEPT® AF WIPES** nahezu ausgeschlossen.

Als Flächendesinfektionsmittel in allen Bereichen, wo eine schnelle Desinfektion gebraucht wird geeignet für:

- ärztliche und zahnärztliche Praxen (z.B. Behandlungstühle, auch Hand- und Winkelstücke)
- Augenärztliche Praxen und Optiker zur Vorbeugung von viralen Infektionen
- Schnelldesinfektion von OP-Inventar und Operationstischen zwischen den Operationen
- Bettgestelle
- Transportmittel wie Krankentransportfahrzeuge, Notarztwagen, Müllentsorgungsfahrzeuge und Transportkörbe
- allgemeines Mobiliar wie Untersuchungsliegen, Verbandswagen, Badewannen und Toilettensitze
- Bekleidung wie OP-Schuhe, Gummischürzen

DESCOCEPT® AF WIPES erfüllen die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit bezüglich der Vermeidung von sensibilisierenden Gefahrstoffen in humanmedizinischen Einrichtungen gem. TRGS 525/540.

ANWENDUNGSBEREICHE

Gem. MPG: Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten.

Gem. Biozidrichtlinie: Zur Schnelldesinfektion und -Reinigung von alkoholbeständigem medizinischen Inventar sowie Flächen aller Art.

ANWENDUNG

Flächen und Gegenstände mit **DESCOCEPT® AF WIPES** vollständig abwischen bzw. ausreichend benetzen.

WIRKUNGSSPEKTRUM

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT® AF** wirkt:

- bakterizid (inkl. MRSA)
- tuberkulozid
- fungizid / levurozid
- virusinaktivierend (HBV/HIV, HCV, BVDV, Rota-, Adeno-, Vakzinia-Viren, Noro-Viren)

EINWIRKZEIT

Die Tränkflüssigkeit **DESCOCEPT® AF** wirkt:

bakterizid inkl. MRSA, fungizid (C. albicans) / levurozid gem. DGHM/ÖGHMP/VAH konz. 1 Min.*
(*gelistet in der 5-Min.-Spalte der DGHM/VAH)

Tuberkulose-Bakterien (M.terrae) konz. 1 Min.
Aspergillus niger konz. 30 min.

Inaktivierung von allen behüllten Viren wie Vakzinia, BVDV, HBV, HIV, HCV

(begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung) konz. 30 Sek.
Rota-/Adeno-Viren konz. 1 Min.
Noro-Viren (FCV) konz. 15 Min.



DESCOSEPT® AF WIPES

alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

ZUSAMMENSETZUNG

Die Tränkflüssigkeit **DESCOSEPT® AF** enthält als wirksame Bestandteile pro 100 g:
42,0 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Inhalt: 1 Dose/Nachfüllbeutel enthält 120 Tücher á 14 x 20 cm, getränkt mit 210 g Desinfektionslösung **DESCOSEPT® AF**

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

(Daten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit **DESCOSEPT® AF**)

Aussehen des Konzentrates: klare, farblose Lösung
pH-Wert: 7,0 +/- 1,0
Dichte (20,0 °C): 0,930 +/- 0,002
Flammpunkt nach DIN 51 755: 25 °C

LIEFERFORMEN

Einzelpackung	Verkaufseinheit	PZN	Art.-Nr.
Dose / 120 Tücher	12 x 1 Dose	1898486	00-312-D120
Refill / 120 Tücher	12 x 1 Beutel	1898581	00-312-R120

BESONDERE HINWEISE

Leichtentzündlich. Behälter dicht geschlossen halten! Bei Kontakt mit den Augen gründlich mit Wasser spülen und Arzt aufsuchen. Von Zündquellen fernhalten! Nicht rauchen!

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

GUTACHTEN

Gutachten beziehen sich auf die Tränkflüssigkeit **DESCOSEPT® AF**:

Dr. Pitten, Hygieniker, Gießen:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien, 11.04.2008.

Prof. Dr. Rotter, Dip.Bact.(London), Wien:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtlinien/prEN 13697,28.02.2006.

Prof. Dr. Schubert, Hygieniker, Frankfurt:

Gutachten zur Flächendesinfektion gem. DGHM/VAH-Richtl., 27.11.2000.

Prof. Dr. Werner, Hygieniker, Schwerin:

Gutachten zur tuberkuloziden Wirksamkeit, 12.04.1999.

Dr. Steinmann, Virologe, Bremen:

Gutachten zur Wirksamkeit gegenüber: Adeno-Viren, 03.05.2001; FCV (Noro-Virus), 04.04.05; Vakzinia, 12.12.2005; BVDV, 12.12.2005.

Dermatest, Münster:

Fachärztliches, dermatologisches Gutachten (Epikutantest), 26.05.2000.

Konrad Hornschuch AG:

Desinfektionsmittelempfehlung bzgl. **DESCOSEPT® AF** zur Anwendung an skai- Polstermaterialien, 09.08.2005.

REGISTRIERUNG / ZERTIFIZIERUNG

Die Tränkflüssigkeit **DESCOSEPT® AF** ist aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der DGHM/VAH.

Die Tränkflüssigkeit **DESCOSEPT® AF** ist aufgenommen in die aktuelle Desinfektionsmittelliste der ÖGHMP.

Die Tränkflüssigkeit **DESCOSEPT® AF** ist registriert als Biozid-Produkt bei der baua (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidgesetz: baua Reg.-Nr.: N - 20338 **DESCOSEPT® AF** entspricht der EU-Richtlinie 93/42 EWG für Medizinprodukte.

